



CANIS-CART
Liberty
Walkin' Wheels® Dog Wheelchair®

Manuel d'utilisation

MINI Taille 00



Luna

Merci d'avoir acheté Canis Cart Liberty MINI
Questions ou Aide?
Appelez-nous au: 02.41.92.49.60

Sommaire



Canis Cart Liberty Mini taille 00, Présentation.....	3
Composition du coffret	4
Apprenez à votre animal de compagnie à utiliser le Canis Cart Liberty.....	5
Guide de démarrage rapide	6
Fixation des Jambières	8
Etriers/ Tailles des Roues/ Prêt à demarrer?	9
Questions ou Aide.....	10
Maintenance,et Garantie	10
Politique de retour.....	11



Canis Cart Liberty Mini T00

Selon les mesures de votre animal de compagnie, vous avez choisi le chariot suivant : .

MINI T00

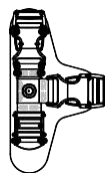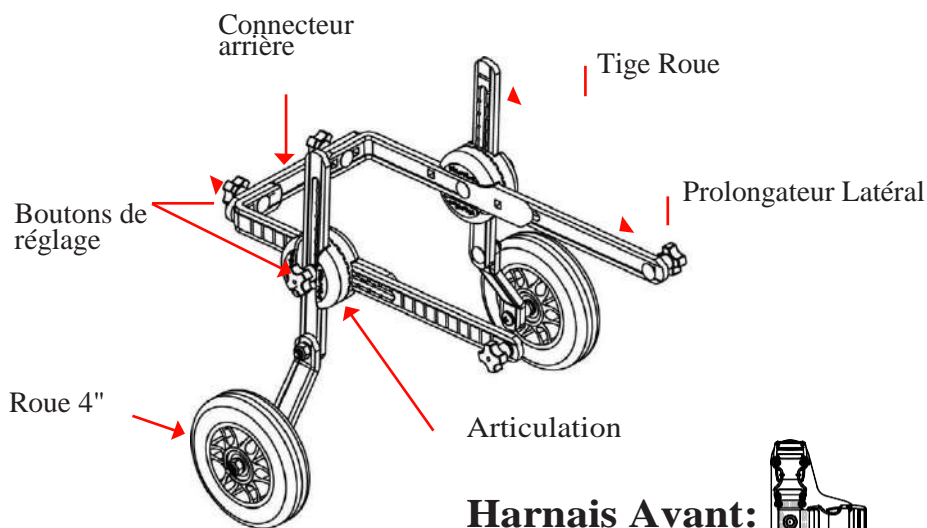

Composition du coffret



Extra Fastener Set



MINI B2
Cadre de Chariot avec
connecteur,
Réglage Largeur,
longueur, hauteur
Extension, jambes et
roues 4"



Harnais Avant
(attaché au cadre.)



Anneaux de Jambes



Etriers pour maintenir les
pattes (à utiliser si
besoin)

Apprenez à votre animal de compagnie à utiliser le Canis Cart Liberty

Nous avons créé le Canis cart Liberty afin d'ajuster en quelques instants le chariot pour mettre votre animal domestique et de l'observer courrir et retrouver l'envie de s'amuser.

Un chariot demande une adaptation pour un animal. Pour certains, l'appareil va être source de bruits étranges et risque de se coincer dans les meubles et les portes.

Ils s'adapteront à tous ces changements selon leur rythme.

Nous vous recommandons d'être patient lors de la première mise en route. Félicitez votre animal avec beaucoup de caresses et de réconfort.


1. Lors de la mise en route, nous vous suggérons d'utiliser des friandises pour récompenser votre animal de compagnie pour un renforcement / comportement positif. Il n'est pas nécessaire de continuer à utiliser les friandises tous les jours, juste au début du processus de formation.
Travaillez avec votre animal de compagnie avant de lui avoir donné un repas. Il sera plus en quête de gagner la récompense s'il a faim.
2. Ne placez pas immédiatement votre animal de compagnie dans le chariot. Assemblez tous les éléments dans la même pièce que votre compagnon pour qu'il puisse le sentir et le toucher.
3. Utilisez le guide de démarrage rapide sur la page suivante.
4. Lorsque votre animal de compagnie est dans le chariot, présentez lui la friandise au niveau de son nez et donnez lui plusieurs morceaux. Ensuite, vous pouvez reculer, en maintenant la récompense face à vous. Il devrait alors marcher vers vous pour l'obtention. Sans vraiment s'en rendre compte, il marche dans le Canis cart Liberty! Encore une fois, donnez-lui une friandise et vos félicitations.
5. Travaillez sur les courtes séances (5-10) minutes, plusieurs fois par jour pour commencer. Donnez à votre animal de compagnie des périodes de repos entre chaque session.

Remarque: Ne laissez pas votre animal de compagnie sans surveillance dans le chariot. Ne pas le laisser toute la journée. Une heure est recommandée.

GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE

Votre coffret Canis Cart Liberty MINI contient tous les éléments nécessaires pour que votre animal retrouve son autonomie.


1. Retirez le chariot de la boîte. La sangle rouge du harnais avant sera sur le bas et la sangle bleue sur le dessus. Relâchez les deux clips afin qu'ils pendent, en les attachant au chariot.
2. Desserrez les roues sur l'articulation. Tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre soit 5 tours pour dévisser. Déplacez l'entretoise perpendiculaire au châssis du chariot avec la sangle rouge du harnais en bas. Réglez la hauteur en fonction de votre pli de mesure du flanc (voir page 8).
3. Longueur: pendant que le bouton est encore desserré, ajustez la longueur à l'aisselle de votre chien jusqu'à la mesure de croupe (voir p.7).
4. Réglage de l'Articulation: serrez la tige noire ronde afin que les dents soient bien engagées.
5. Anneaux de jambe: Fixez les quatre fils autour du cadre pour former un siège. Les fils devraient être enroulés de chaque côté de la bride. Si vous appuyez sur la pièce du milieu, il devrait se former un siège.
6. Largeur: Dévissez les boutons à l'arrière et ajustez-vous à la zone la plus large de votre chien, qui est habituellement la largeur du poitrail (voir p.7).
7. Étriers: Fixez les étriers autour des deux boutons noirs à l'arrière. Fixez la partie supérieure autour des boutons et ajustez la longueur des étriers (voir p.9).

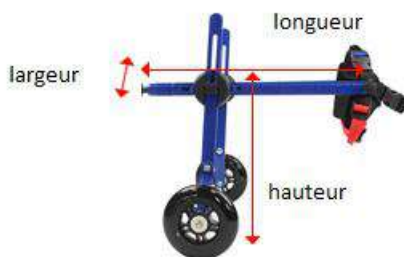

Largeur

Pour régler la largeur du cadre du chariot, mesurez le poitrail de votre animal de compagnie, puis ajoutez 2.5 cm à cette mesure.

La largeur du châssis du chariot doit être réglée sur cette taille.

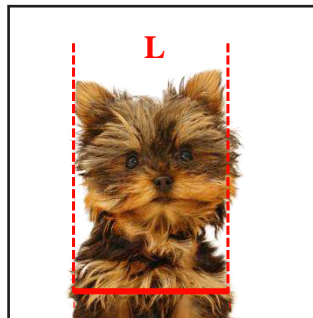


Si la largeur doit être réglée, dévissez les boutons arrière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le connecteur arrière se déclenche, en prenant soin de ne pas perdre les petites rondelles qui se trouvent à l'intérieur des boutons.

Alignez le connecteur arrière avec les trous qui vous donneront la mesure de largeur dont vous avez besoin. Assurez-vous que le connecteur arrière est installé à l'extérieur (derrière) le cadre du chariot.

Vissez les boutons à l'extérieur du connecteur arrière, en vous assurant de placer chaque rondelle entre le bouton et le connecteur arrière. Serrez les boutons..

Longueur

Les boutons situés sur l'articulation maintiennent les bras et les prolongateurs latéraux en place. Mesurez votre animal de compagnie de la hanche à l'omoplate. Faites que cette mesure correspond à la mesure du centre de l'articulation à l'extrémité avant de chaque prolongement latéral, comme indiqué ci-dessous.

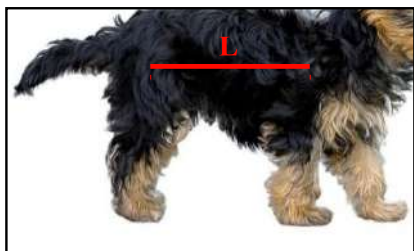

Mesurez votre animal de la hanche à l'omoplate.



Réglez la mesure de votre animal.

Remarque: L'articulation devrait être au centre de la hanche de votre animal de compagnie. L'avant de l'extension doit être à l'omoplate. Vous devriez avoir quelques cm à l'arrière de la croupe pour l'élimination des urines et déjections.

Hauteur

Prenez la mesure de la jambe de votre animal (pli du grasset); Cela devrait correspondre à la mesure du bas de l'articulation au sol. Ajustez l'entretoise pour correspondre à la mesure de votre animal.

Vous pouvez effectuer ce réglage en dévissant le bouton sur chaque articulation de quelques tours, puis en glissant l'étrier bleu vers le haut pour réduire la hauteur, ou vers le bas pour augmenter la hauteur. Ensuite, serrez chaque bouton.

Remarque: Mettez votre paume à l'intérieur, sur l'articulation, pour faciliter le mouvement des jambes..



Prenez la mesure au Pli du grasset.




Réglez la mesure

Fixation des jambières

Les anneaux de jambes sont le système de support arrière de votre animal de compagnie. Les fils revêtus doivent être positionnés de part et d'autre de chaque articulation, en s'assurant que les anneaux de jambe en mousse ressemblent à deux lettres C adossés. En commençant sous le cadre, enveloppez bien le fil dessous et au dessus du cadre pour fournir un siège sécurisé.

Mettez les jambes dans chaque anneau

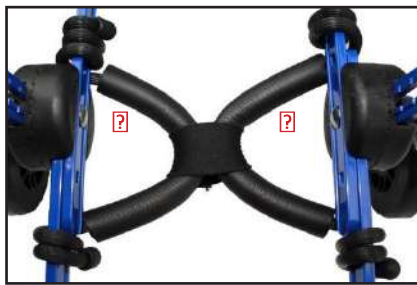

Remarque: Les anneaux de jambes doivent être suspendus en dessous du châssis du chariot, en s'assurant que la pièce au milieu soit bien reliée aux tubes en mousse.

Etriers

Si les jambes de votre animal de compagnie sont paralysées, utilisez les étriers pour maintenir les jambes hors du sol. L'extrémité supérieure de chaque étrier est fixée autour de chaque bouton arrière. Le verrouillage à billes supérieur est utilisé pour maintenir chaque étrier en place, et la boule de verrouillage inférieure est fixée au-dessus du jarret.



Tailles des Roues

Votre chariot est équipé de roues tout terrain de 4" attachées aux entretoises. Lorsqu'elles sont usées, vous pouvez acheter ces pieces de remplacements en nous contactant au 02.41.92.49.60.

Prêt à commencer à utiliser le chariot?

1. Anneaux de jambes: Prenez votre animal de compagnie et mettez-le dans les Anneaux de jambes. Chaque jambe entre dans l'anneau. L'abdomen se reposera sur la pièce Velcro du milieu tenant les anneaux ensemble. Les pattes arrière doivent toucher le sol. Utilisez des étriers si les jambes de l'animal sont paralysées.



2. Harnais avant: régler les pattes avant de l'animal de compagnie avec la sangle rouge sur le harnais avant. Prenez la sangle bleue sur le dos et clipsez. Mettez la sangle noire devant la poitrine et mettre le clips en place. Réglez les trois sangles afin qu'elles soient bien ajustées.

Remarque: si vous devez laver le harnais, vous pouvez l'enlever en dévissant les boutons de chaque côté, puis en enlevant les vis et les rondelles.

Questions ou Aides?

Tél: [02.41.92.49.60](tel:02.41.92.49.60)

Si vous avez besoin d'une aide appropriée, nous sommes là pour vous aider. Vous pouvez nous joindre au n° de telephone ci dessus.



Maintenance et Garantie

Maintenance: Avec une utilisation et une maintenance appropriées, le chariot est conçu pour durer toute une vie. Lorsque vous avez besoin de pièces de rechange pour les roues, les harnais et autres articles d'usure, peuvent être achetés chez Polytrans. Le cadre du chariot ne rouillera pas. Tous les composants peuvent être retirés et nettoyés. L'huilage n'est pas nécessaire.

Garantie: La Canis Cart Liberty est garantie 1 An pour une utilisation normale.

Politique de retour: Si vous essayez le Chariot et que cela ne fonctionne pas pour votre animal de compagnie en raison du design ou de l'ajustement, appelez-nous le plus rapidement possible.

Nous vous rappelons nos conditions de retour à savoir que vous disposez d'un délai de 14 jours à réception de votre colis pour nous effectuer un retour.

Le produit doit **IMPÉRATIVEMENT** nous être retourné en parfait état, ne doit pas avoir été utilisé, ne pas porter de trace de montage ni être abimée, rayé, sali ou malodorant, ou tout autre motif qui le rendrait impropre à la revente.



All Sizes on a Roll!

MINI



SMALL



MEDIUM

LARGE



 **Polytrans**
pour tous ceux qui ont du flair



www.polytrans.fr

Route de la prévière- POUANCE- 49420 OMBREE D'ANJOU

Téléphone : 02.41.92.49.60 – Fax : 02.41.92.40.40